

KULKŠNIES - PĖDOS ĮTVARAS KT 0-2-1 / ANKLE-FOOT ORTHOSIS KT 0-2-1

Šis įtvaras – tai patobulinta įtvaro KT 0-2 versija: dėl specialios konstrukcijos ypač gerai sutvirtina čiurnos sąnarį. Papildomi diržai imituoja kinezologinį teipavimą „aštuoniuke“. Patogus suvarstymas – lengva užsimauti, kas itin aktualu, esant patinimams. Įtvarą geriausiai dėvėti ant kojinių – tai užtikrina didesnę oro laidumą bei komfortą.

It is an enhanced version of the support KT 0-2: special design for reinforced especially good ankle joint. Convenient lacing - easy to wear, which is especially true if the swelling. Best worn over socks - this provides a higher air permeability and comfort.



Rekomenduojamas, esant čiurnos sąnario raiščių, sausgyslių ar sąnarinės kapsulės patempimui, daliniam plyšimui bei čiurnos sausgyslių, raumenų, nervų uždegimui, čiurnos sąnario nestabilumui; reabilitacijos laikotarpiu po čiurnos sąnario operacijų, raiščių plyšimo ir kaulų lūžių.

Recommended for use during recovery period after tarsus joint traumas and surgeries. In case of inflammation of ankle joint or joint instability. Immobilizes the ankle joint.

Sudėtis: 100 % poliesteris.

Composition: 100 % polyester.



	XS	S	M	L	XL
cm	20-24	24-28	28-32	32-36	36-39

Rekomendacijos:

Dėl įtvaro dėvėjimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju.

Nedėvėkite įtvaro, jeigu pastebėjote alerginius odos pakitimus.

Recommendations:

Consult your doctor on the expediency of wearing the orthosis and the recommended time of wearing it. Do not wear the orthosis if you notice any skin sensitiveness.

Priežiūra/ Washing instructions:



Rekomenduojama skalbti rankomis arba švelniu režimu skalbimo mašinoje ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenyje. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Gaminį skalbkite ir džiovinkite užsegta. Skalbant skalbimo mašina, įtvarą įdėkite į specialų skalbimui skirtą maišelį. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio. It is recommended to hand-wash the orthosis in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. Dry at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from fire and heat. If the product is fitted with a Velcro, it should be washed and dried closed. Be careful to take out all hard details/parts before washing. If you wash in a washing machine, place the orthosis into a special bag to prevent the Velcro from spoiling other clothes.

Garantija suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminys naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.

The warranty is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.

Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.

Gamintojas:

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt

www.ortopedija.lt

Producer:

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com



ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Pateikiama informacija
paskutinį kartą peržiūrėta 2019-11-27

UŽSIDĚJIMO INSTRUKCIJA

