

GAMINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA USER'S MANUAL



KELIO ĮTVARAS KT 3-8-14 / KNEE ORTHOSIS KT 3-8-14

Rekomenduojamas, esant gimnelės ir kelio sąnario raiščių, sausgyslių bei raumenų patempimui, uždegimui. Stabilizuoja gimnelę, šildo kelio sąnarį. Įtvaras netrukdo judėti, sumažina traumų pasikartojimo tikimybę.

The orthosis stabilizes knee-cap and warms knee joint. Used in cases of strain, inflammation of knee-cap and knee joint ligaments, tendons and muscles.

Sudėtis: 74% poliamidas, 26% elastinis poliuretanas.

Composition: 74% polyamide, 26% elastic polyurethane.

Dydis. universalus.

Size: universal.



Dėvėjimas.

1. Įtvarą užsidėkite ant kelio sąnario taip, kad kiaurymė apimtų kelio gimnelę.
2. Užsekite prilaikančiąsias juostas.

Directions for use:

1. Wear the orthosis so, that the fixing pad would be under the knee ball.
2. Fasten the supporting strip.

Rekomendacijos:

Dėl įtvaro dėvėjimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju.

Nedėvėkite įtvaro, jeigu pastebėjote alerginius odos pakitimus.

Recommendations:

Consult your doctor on the expediency of wearing the orthosis and the recommended time of wearing it. Do not wear the orthosis if you notice any skin sensitiveness.

Priežiūra/ Washing instructions:



Rekomenduojama skalbti rankomis arba švelniu režimu skalbimo mašinoje ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenyje. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Gaminį skalbkite ir džiovinkite užsegta. Skalbiant skalbimo mašina, įtvarą įdėkite į specialų skalbimui skirtą maišelį. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio.

It is recommended to wash the orthosis in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. Dry at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from fire and heat. If the product is fitted with a Velcro, it should be washed and dried closed. If you wash in a washing machine, place the orthosis into a special bag to prevent the Velcro from spoiling other clothes.

Garantija suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu laikotarpiu gaminys naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.

The warranty is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose and its construction is not modified.

Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.

Thank you for choosing our product. We trust you'll feel better.

Gamintojas:

Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas, Lietuva

Tel.: (8-37) 313303

el. paštas: info@ortopedija.lt

www.ortopedija.lt

Producer:

Partizanų str. 17, LT-49476 Kaunas, Lithuania

Tel.: +370 37 313303

e-mail: info@orthopedic-pro.com

www.orthopedic-pro.com



ORTOPEDIJOS TECHNIKA

Pateikiama informacija
paskutinį kartą peržiūrėta 2020-01-10